

## Instructie voor de afname van pus en punctaten

Het materiaal kan met een wattenstok worden afgenomen, maar om te voorkomen dat er een besmetting met de normale huidflora plaatsvindt, kan men -indien mogelijk- het beste de pus opzuigen met een steriele spuit. Ook voor diepere abscessen geniet afname van het materiaal in een steriele spuit de voorkeur. Materiaal mag eventueel overgebracht worden in een steriele algemene container voor aanlevering op het MMI.

### Benodigheden

- wattenpropje
- huiddesinfectans
- steriele spuit (met schroefdoopje)
- algemene container
- transportmedium (E-swab)



E-swab medium

### Analysemonster

- pus
- punctaat

### Aanvraag

De aanvraag voor het afnemen van materiaal wordt geregeld door de medisch specialist en huisarts

Medisch specialist:

Aanvraag dient via een HIX order gedaan te worden.

Materiaal	Vocht/Punctaat	Aanvulling
Herkomst	Vocht/Punctaat-pus	

**Vocht punctaten**

- Banale kweek
- Schimmel kweek
- Nocardia kweek
- Actinomyces kweek
- TBC kweek + PCR
- Toxoplasma PCR
- Mycobacterium PCR
- Rubella PCR
- Mazelen PCR
- Leishmania PCR
- treponema pallidum PCR
- Bartonella henselae PCR
- Adenovirus PCR
- Borrelia PCR
- Kingella PCR
- Actuele Bicarbonaat

HIX order

Materiaal	Vocht/Punctaat	Aanvulling
Herkomst		

**Omschrijving**

- Vocht/Punctaat-cystevocht
- Vocht/Punctaat-dialysaat
- Vocht/Punctaat-gal
- Vocht/Punctaat-prothese
- Vocht/Punctaat-pus
- Vocht/punctaat - overig
- Vocht/Punctaat - ascites
- Vocht/Punctaat - buik
- Vocht/Punctaat - gewricht
- Vocht/Punctaat - pericard
- Vocht/Punctaat - pleura
- Vocht/Punctaat - wond
- Vocht/Punctaat - hals

Keuze herkomst



Huisarts ZorgDomein:

### Aanvraagformulier

Vaak gekozen
Probleemgroepen
Categorieën
Materialen ☆
Bepalingen A-Z

#### Bepalingen per materiaal

<p><a href="#">Bloed</a></p> <p><a href="#">Feces</a></p> <p><a href="#">Haar</a></p> <p><a href="#">Huidschilfers</a></p> <p><a href="#">Nagel</a></p>	<p><a href="#">Overige materialen</a></p> <p><a href="#">Punctaat</a></p> <p><a href="#">Sputum</a></p> <p><a href="#">Uitstrijk</a></p> <p><a href="#">Uitstrijk genitaal</a></p>	<p><a href="#">Uitstrijk rectum</a></p> <p><a href="#">Urine</a></p> <p><a href="#">Urine - 24 uurs</a></p>
---	--	---

[Feedback op aanbod](#)

---

#### In te vullen vragen

Opmerkingen / klinische gegevens

Nazorg donor  Ja

**Alg. bacterieel** Vocht / punctaat - Kweek Punctaat

Gebruik antibiotica  Ja, namelijk:  
 Nee

Allergie antibiotica  Ja, namelijk:  
 Nee  
 Onbekend

Herkomst materiaal vocht/punctaat  Ascites  
 Drainvocht  
 Punctaat  
 Gewrichtsvocht  
 Kniepunctaat  
 Pus  
 Anders, namelijk:

---

#### Afhandeling / logistiek

Huisbezoek  Ja  
 Nee

Uitslag doorbellen

Kopie naar

Algemene ZorgDomein formulier

## Aanvraagformulier

🔍 Pakket of losse bepaling vinden...

Vaak gekozen    Probleemgroepen    Categorieën    **Materialen ☆**    Bepalingen A-Z

### Bepalingen per materiaal

Bloed	Overige materialen	Uitstrijk rectum
Feces	<b>Punctaat</b>	Urine
Haar	Sputum	Urine – 24 uurs
Huidschilfers	Uitstrijk	
Nagel	Uitstrijk genitaal	

### Keuze punctaat

### Punctaat ✕

**Alg. bacterieel** Vocht / punctaat - Kweek  
Punctaat

🕒 Graag een papieren aanvraagformulier toevoegen aan het materiaal.

**Borrelia burgdorferi (Lyme)**  
Vocht / punctaat - PCR Punctaat

**Neisseria gonorrhoeae** Vocht / punctaat  
- PCR Punctaat

Annuleren
👉 Feedback op aanbod
Toevoegen

Pop up verschijnt “papieren aanvraagformulier toevoegen”

- Klik op toevoegen.
- De ZorgDomein order is gemaakt.

Materiaal moet met papieren ZorgDomein order naar MMI.

### Afname

1. De huid rond de punctieplaats ontsmetten.
2. Met een spuit pus/punctaat opzuigen.
3. De naald verwijderen in de daarvoor bestemde naaldencontainer.
4. Het dopje op de spuit schroeven.
5. Evt. mag het materiaal overgebracht worden in een algemene container.
6. Plak de HIX/patiëntsticker op de spuit (zonder naald) of de algemene container die aangeleverd wordt op het MMI



Afname pus met spuit

**Alleen bij zeer kleine hoeveelheden de pus met behulp van een E-swab afnemen. Maak dan de HIX / ZorgDomein order aan onder tabblad “Uitstrijk”.**

Materiaal	Uitstrijk	
Herkomst		Aanvulling
Omschrijving		
Uitstrijk - lochia		
Uitstrijk - mond		
Uitstrijk - nasopharynx		
Uitstrijk - navel		
Uitstrijk - neus		
Uitstrijk - oksel		
Uitstrijk - oog		
Uitstrijk - oor		
Uitstrijk - overig		
Uitstrijk - perineum		
Uitstrijk - penis		
Uitstrijk - peri-anaal		
Uitstrijk - pus		
Uitstrijk - sectie		
Uitstrijk - sinus		

Tabblad “uitstrijk” HIX


#### Bepalingen per materiaal

Bloed	Overige materialen	Uitstrijk rectum
Feces	Punctaat	Urine
Haar	Sputum	Urine – 24 uren
Huidschilfers	<b>Uitstrijk</b>	
Nagel	Uitstrijk genitaal	

Tabblad “Uitstrijk” ZorgDomein

Gebruiksaanwijzing van de E-swab:

1. Open de verpakking.  
**De wisser bovenaan vastpakken bij de afname van het monster en niet onder het rode streepje.**
2. Met de wisser materiaal afnemen.
3. Open het buisje en steek de wisser erin.
4. Breek de wisser af bij het breekpunt (= rode streep).
5. Draai de dop op het buisje tot deze goed gesloten is.
6. Plak de HIX order sticker of patiëntsticker op het buisje

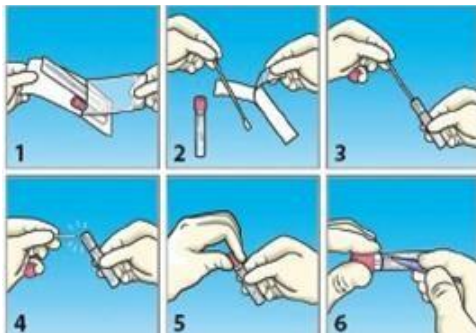

Het materiaal wordt zo spoedig mogelijk naar het gebracht.

Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje “Bewaar- en transportinstructies” onder het onderdeel “Informatie voor aanvragers” op onze website [www.mmilab.nl](http://www.mmilab.nl).